

Pleurofix®

Mehr Sicherheit in Handhabung und Hygiene

Geschlossenes Pleurapunktionsbesteck



Pleura Drainage Systeme

Pleurofix® Geschlossenes Pleurapunktionsbesteck

<p>Überleitungsschlauch mit Standardkegel (Pleurofix® Nr. 2) oder mit Lock-Ansatz und Dreibegehahn (Pleurofix® Nr. 1 – nicht abgebildet)</p>	
<p>Doppelrückschlagventil (Pleurofix® Nr. 2) oder mit Dreibegehahn (Pleurofix® Nr. 1 – nicht abgebildet)</p>	
<p>Omnifix®-Lock: Leichtgängige 60 ml Omnifix®-Spritze</p>	
<p>Dünnwand-Punktionskanüle: Punktion am indikationsgemäßen Ort</p>	
<p>Sekretbeutel: Graduierter Sekretaufangbeutel mit 2 Liter Fassungsvermögen</p>	

Pleurapunktion

Ansammlungen von Luft und/oder Flüssigkeit im Pleuraraum können zu lebensbedrohlichen Störungen der Atem- sowie Herzfunktion führen. Ziel jeder Notfalltherapie ist daher, die Beseitigung der Luft oder Flüssigkeit zu garantieren. Dies geschieht mittels einer einmaligen Nadelpunktion zur Entfernung von Luft oder Flüssigkeit.


Pleurofix® Anwendungsgebiete

- Sekretentfernung aus dem Pleuraraum
- Pneumothorax
- Spülung des Pleuraraumes
- Medikamenteninstillation

Pleurofix® Nr. 1

Dreizehnhahn

- Bedienungsfreundlich mit Richtungsanzeige
- Möglichkeit der Medikamenteninstillation

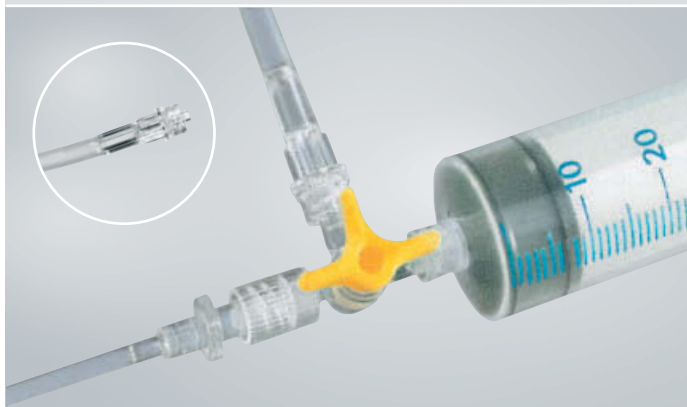

Pleurofix®, Besteck zur Pleurapunktion Art.-Nr. VE

Pleurofix® Nr. 1 mit Discifix®-Dreizehnhahn, gelb	4461002	25
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm ▪ Überleitungsschlauch mit Lock-Ansatz ▪ Omnifix®-Lock Einmal-Spritze 60 ml ▪ Sekretbeutel 2,0 l 		

Sekretbeutel passend an Pleurofix® Nr. 1	4462009	100
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lock-Ansatz (männlich) ▪ Überleitungsschlauch 90 cm ▪ 2,0 l ▪ einzeln verpackt, steril 		

Pleurofix® Nr. 2

Doppelrückschlagventil

- Kein Rückfluss von Flüssigkeiten zum Patienten
- Leichtes Aspirieren der Flüssigkeiten und schnelles Überleiten in den Sekretbeutel



Pleurofix®, Besteck zur Pleurapunktion Art.-Nr. VE

Pleurofix® Nr. 2 mit Doppelrückschlagventil	4461037	25
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dünnwand-Punktionskanüle mit Kurzschliff 1,8 x 80 mm ▪ Überleitungsschlauch mit Standardkegel ▪ Omnifix®-Lock Einmal-Spritze 60 ml ▪ Sekretbeutel 2,0 l 		

Sekretbeutel passend an Pleurofix® Nr. 2	4423208	100
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardkegel ▪ Überleitungsschlauch 90 cm ▪ 2,0 l ▪ einzeln verpackt, steril 		

Anwendung

Die Punktion muss unter aseptischen Bedingungen erfolgen. Kanüle und Spritze ankoppeln an Dreizehnhahn bzw. Verlängerungsschlauch. Kanüle durch entsprechende Stellung des Dreizehnhahns absperren. Punktion durchführen und Kanüle bis in den Pleuraspalt schieben. Sekret in die Spritze saugen und danach in Beutel überführen*. Nachlaufendes Sekret ebenfalls entfernen. Kanüle aus Pleuraraum herausziehen.

* bei Pleurofix® Nr. 1 Dreizehnhahn verstellen;
bei Pleurofix® Nr. 2 übernimmt das Doppelrückschlagventil die Funktion des Dreizehnhahns.
Verstellen entfällt daher.

Anwendungsvorteile

- Geschlossenes System durch luft- und flüssigkeitsdichte Luer-Lock-Sicherheitsverbindung
- Rasche Drainage des Pleuraraumes
- Atraumatische Punktion
- Möglichkeit der Medikamenteninstillation

